



Preparación Master Mix

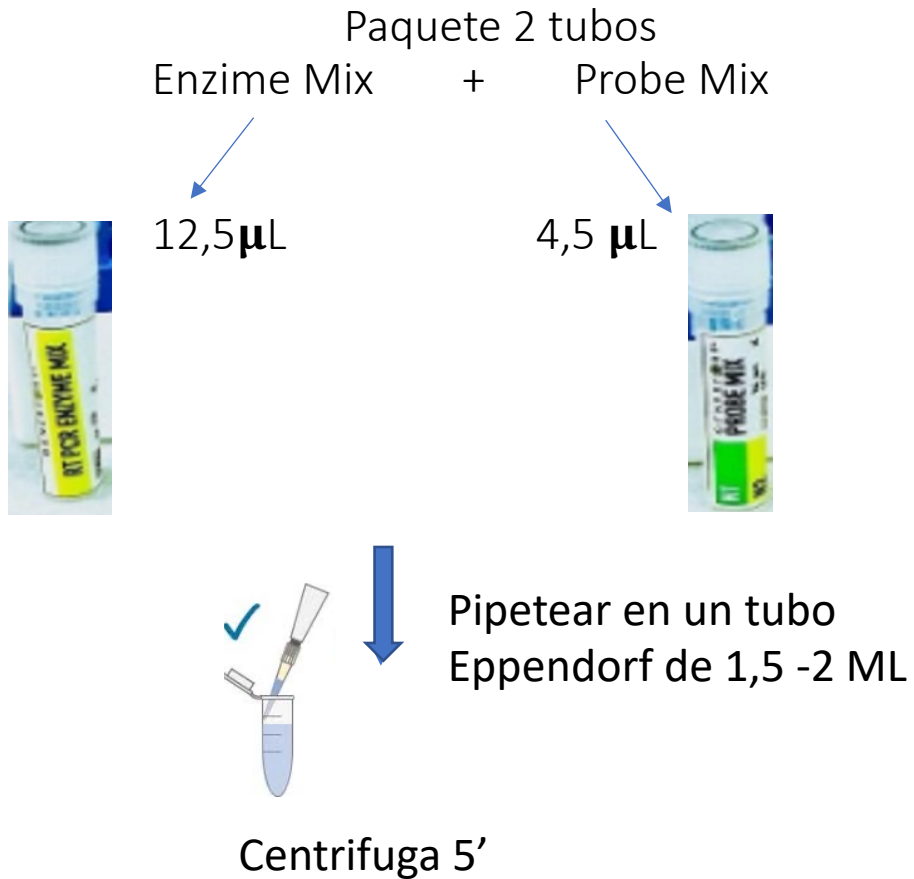

Preparacion de la placa

Vol. 20 μL

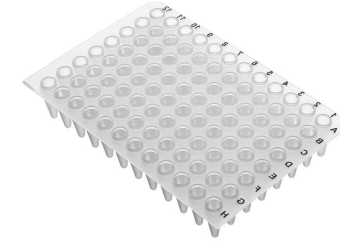

- MasterMix 16,5 μL
Muestra 3,5 μL
- Control Positivo
16,5 μL Mmix
3,5 μL Control + Paquete genestore
- Control Negativo
16,5 μL Mmix + 3,5 agua libre
nucleasa

Para reacciones N1 y N2 multiplexadas		
Componente	Volumen por muestra o control	Volumen para N muestras o controles
ENZYME MIX	12.00 μL	12.00 * [N + 1] μL
PROBE MIX	4.50 μL	4.50 * [N + 1] μL
Volumen total del Mix de Reacción	16.50 μL	-